

## Prøvetaking og forsendelse av Dermatofytter

Merk røret med strekkode med sluttsiffer A.  
Trykk proppen godt ned før forsendelse.

### Prøvetakingsrutiner:

**Hud:** Hudavskrap fra periferien av angrepet hudparti.

**Negl:** Avskrap fra de deler av neglen som viser forandringer, samt fra undersiden av neglens distale del. Det er ikke nødvendig å sende hele negler.

**Hår:** Angrepne hår trekkes ut med pinsett. Hvis håret er langt, klipp av den ytterste delen og send inn den innerste, 1 – 2 cm lange, delen.

