

## Urinprøvetaking til mikrobiologiske undersøkelser

Røret inneholder borsyre for lenger holdbarhet ved transport.



<p><b>Farge</b> Olivengrønn propp</p>	<p><b>Bruksområde</b> Urinprøver til dyrkning</p>	<p><b>Steril engangsforpakning inneholder</b> Oppsugingsadapter og forsendelsesrør med borsyre</p>
---	---	--

### Prosedyre for prøvetaking

- Midtstråle – vaskeprøve anbefales
- Samle urin i et rent beger
- Stikk adapterspissen ned i urinen – og påse at spissen holdes under væskenivå i hele prosessen
- Koble adapteren til forsendelsesrøret, slik at urinen suges opp i røret
- Hold til røret er fullt
- Adapteren brukes kun 1 gang og kastes sammen med risikoavfall
- Vend røret **8–10 ganger** slik at borsyre og urin blir blandet
- Merk prøven med riktig PrøveID (strekke-etikett) fra rekvisisjonen. Etiketten er merket "Urin" og har sluttsiffer 8. Påsettes loddrett utenpå vakuumsrørets etikett.
- Oppbevares i kjøleskap før forsendelse
- Holdbar i 48 timer etter prøvetaking