

## Rør - uten tilsetning - til urinprøver Vacuette® - Z Urine No Additive



Vakuurrør med gul propp benyttes til innsending av urinprøver til:  
Klinisk kjemiske urinanalyser, elektroforese, rusmidler, spor- og tungmetaller.

1. Urinprøven lates i en ren beholder (plastkopp el lign)
2. Stikk adapterspissen ned i urinen – og påse at spissen holdes under væsknivå i hele prosessen
3. Koble adapteren til forsendelsesrøret, slik at urinen suges opp i røret ved hjelp av vakuum
4. Hold til røret er fullt
5. Adapteren brukes kun 1 gang og kastes sammen med risikoavfall
6. Merk prøven med riktig Prøve ID (strekke-etikett) fra rekvisisjonen. Etiketten er merket "Urin" og har sluttsiffer **8**. Påsettes loddrett utenpå vakuurrørets etikett.
7. Sendes til Fürst (husk transporthylse ved postforsendelse)

Røret må ikke åpnes før forsendelse!

Ved ønske om urin stix-analyse må "rest-urinen" i prøvetakingskoppen benyttes (for å unngå forurensning av prøven).

Se [www.furst.no](http://www.furst.no) for ytterligere informasjon