

Merking av rør til belastninger og kortisol aften

For å oppnå optimal behandling av prøvene er det svært viktig at vi mottar materiale som er tatt på korrekt måte, og som er merket med riktig etikett.

Analyse	Innsending	Merking av rør
Glukose- belastning (042)	Prøve 1 (fastende) (041)	Merkes med etikett med sluttsiffer 4
	Prøve 2 (etter 2 timer)	Merkes med etikett med sluttsiffer A eller B
Laktose- belastning (255)	Prøve 1 (fastende)	Merkes med etikett med sluttsiffer 4
	Prøve 2, 3, 4 og 5	<i>Rekvisisjon til Fordøyelsessykdommer:</i> bruk etikett med sluttsiffer A etter en halv time, B etter 1 time, C etter halvannen time og D etter 2 timer
		<i>Vanlig rekvisisjon:</i> Bruk etiketter <i>uten</i> strek-kode. Husk å merke prøvene med prøvetakingstidspunkt.
Jernbelastning	Prøve 1 (jernfastende) (043)	Merkes med etikett med sluttsiffer 4
	Prøve 2 (etter 3 timer)	Merkes med etikett med sluttsiffer A eller B
Kortisol morgen Kortisol aften	Prøve 1 (kl 08.00) (301)	Merkes med etikett med sluttsiffer 4
	Prøve 2 (kl 19.00) (302)	Merkes med etikett med sluttsiffer A eller B

oktober 2009

Kontakt Kundestøtte tlf 22 90 96 66 for utfyllende informasjon.
Gratis prøvetakingsutstyr kan bestilles av legekantor via www.furst.no eller
varebestilling@furst.no eller faks 22 90 96 97.