

Væskebasert prøvetaknings- og transportsystem for fecesdiagnostikk

Et kit inneholder **flytende Cary Blair** eluerings- og transportmedium og en fecalSwab.

fecalSwab preserverer nukleinsyrer og antigener fra bakterier og virus.

Egner seg for påvisning av tarmpatogene bakterier, -virus og protozoer.



Farge	Bruksområde	Steril engangsforpakning inneholder:
Grønn propp	Fecesprøver Flytende og fast prøvemateriale	Polypropylenrør med skrupropp. Røret er konisk innvendig, og inneholder 2 ml Cary Blair medium. Prøvetakningspensel i <i>normal</i> størrelse med tip i nylon flockfiber. Pinne med knekk.

Prosedyre for prøvetaking

1. Åpne pakningen med pensel og transportrør.
2. Ta penselen ut av pakningen.
3. Dypp penselen i fecesprøven. Penselen skal være helt dekket av prøvemateriale. Ved direkte prøvetaking i rektum anbefales det at penselen ikke føres lenger enn 1-2 cm.
4. Skru av proppen.
5. Sett penselen tilbake i transportrøret.
6. Knekk pinnen i knekkpunktet (farget stripe).
7. Skru på proppen og merk transportrøret med strek-kode-etikett fra rekvisisjonen.