

Beskrivelse av riktig etikettvalg og plassering av etikett

BD Vacutainer						Vacurette
EDTA rør	EDTA m/ gel	Citrat rør	Serum rør	Legemidler Diakonhjemmet	Heparin u/ gel	Heparin m/ gel
Sluttsiffer på etikett						
1	2	3	4 og/eller 5	6	7	7
Oppbevaring						
Romtemp.	Kjøleskap	Romtemp.	Kjøleskap	Kjøleskap	Romtemp.	Romtemp.

A/B-etikettene skal brukes til diverse prøver og pensler.

A

B

Må brukes til:

- Kortisol aften
- Glukose-belastning prøve 2
- Jern-belastning prøve 2

A/B-etikettene kan også benyttes til andre prøver.

NB! Type av pipettert materiale må påføres etiketten.

- Bruk etikett med riktig sluttsiffer
- Etikett plasseres loddrett, rett i underkant av propp (↑ pil mot propp)