

Prøvetakingsprosedyrer og merking av spesialrør til Fürst

Analyse	Prøvetakingsprosedyre	Innsending	Merking av rør
Sink, selen, kobber og aluminium i heparinplasma	Li-heparin-rør m/gel (Vacuette) (Grønn propp med gul ring) vend 5 ganger, må stå i stativ - ikke ligge - må sentrifugeres innen 2 timer	Prøvetakingsrøret innsendes	Etikett med sluttsiffer 7 (evt A eller B)
Bly, kadmium og kvikksølv i heparinblod	Heparinrør (Mørk grønn propp) vend 8-10 ganger	Prøvetakingsrøret innsendes	Etikett med sluttsiffer 7 (evt A eller B)
Homocystein i EDTA-plasma	EDTA-rør m/gel (Gråhvit propp) må stå i stativ - ikke ligge - må sentrifugeres innen 30 min	Prøvetakingsrøret innsendes etter inspeksjon; gelen må være tett, og ligge kompakt og vannrett i røret	Etikett med sluttsiffer 2
Kortisol i serum, morgen og aften	Merking av rør: Første prøve (kl. 08.00): Etikett med sluttsiffer 4 eller 5 Andre prøve (kl. 19.00): Etikett med sluttsiffer A Viktig: Prøvene må bestilles hver for seg i to rekvireringer.		
Glukosebelastning i serum	Merking av rør: Første prøve (fastende): Etikett med sluttsiffer 4 eller 5 Andre prøve (etter 2 timer): Etikett med sluttsiffer A		
Laktosebelastning i serum	Merking av rør: Første prøve (fastende): Etikett med sluttsiffer 4 eller 5 Prøve nr 2 - 4: Etiketter uten strek-kode Viktig: Prøve nr 2 - 4 merkes med tidspunkt for prøvetaking		
Jernbelastning i serum	Merking av rør: Første prøve (jernfastende): Etikett med sluttsiffer 4 eller 5 Andre prøve (etter 3 timer): Etikett med sluttsiffer A		

Kontakt Kundestøtte tlf 22 90 96 66 for utfyllende informasjon
Gratis prøvetakingsutstyr kan bestilles via www.furst.no