

## Holdbarhet for mikrobiologiske prøver:

<b>Dyrkning/Mikroskopi</b>			
<b>Undersøkelse</b>	<b>Prøvetakingsrør/ Materiale</b>	<b>Holdbarhet etter prøvetaking</b>	<b>Oppbevares i</b>
Aerobe bakterier	eSwab	48 timer	Kjøleskap
Anerobe bakterier	eSwab	24 timer	Kjøleskap
Bakterier	Urin med borsyre	48 timer	Kjøleskap
Bakterier	FekalSwab - Cary Blair	48 timer	Kjøleskap
Bakterier	eSwab	48 timer	Kjøleskap
ESBL	eSwab	48 timer	Kjøleskap
Gjærsopp	eSwab	48 timer	Kjøleskap
Gonokokker	eSwab	24 timer	Romtemperatur
Mikroskopi	Tapepreparat	Lang holdbarhet, men prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig	Kjøleskap
Mikroskopi	Feces (rør med fikseringsvæske)	7 døgn	Kjøleskap
MRSA	eSwab	48 timer	Kjøleskap
Muggsopp	eSwab	48 timer	Kjøleskap
VRE	eSwab	48 timer	Kjøleskap
<b>Molekylærbiologi (PCR)</b>			
<b>Undersøkelse</b>	<b>Prøvetakingsrør</b>	<b>Holdbarhet etter prøvetaking</b>	<b>Oppbevares i</b>
Bakteriepanel	FekalSwab - Cary Blair	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
C.difficile	FekalSwab - Cary Blair	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
Dermatofytter	Hudavskrap	Lang holdbarhet, men prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig	Romtemperatur/kjøleskap
Dermatofytter	Negl		Romtemperatur/kjøleskap
Dermatofytter	Hår		Romtemperatur/kjøleskap
Herpes Simplex 1/2	eSwab	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
Influenza A/B	eSwab	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
Luftveisbakterier	eSwab	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
Luftveisvirus	eSwab	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
Parasittpanel	FekalSwab - Cary Blair	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
Periodontitt	Papirspisser i sterilt prøvetakingsrør	Lang holdbarhet, men prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig	Romtemperatur/kjøleskap
Treponema pallidum (syfilis)	eSwab	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
Varicella zoster	eSwab	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap
Viruspanel	FekalSwab - Cary Blair	5 døgn/ 7 døgn	Romtemperatur/kjøleskap

## Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI)

*OBS! Må bruke Aptima urinrør og Aptima Swab. Disse materialene kan ikke brukes til dyrkning!*

Undersøkelse	Prøvetakingsrør	Holdbarhet etter prøvetaking	Oppbevares i
C.trachomatis	Urin, Aptima	Lang holdbarhet, men prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig	Romtemperatur/kjøleskap
C.trachomatis	Aptima Swab		Romtemperatur/kjøleskap
M.genitalium	Urin, Aptima		Romtemperatur/kjøleskap
M.genitalium	Aptima Swab		Romtemperatur/kjøleskap
N.gonorrhoeae	Urin, Aptima		Romtemperatur/kjøleskap
N.gonorrhoeae	Aptima Swab		Romtemperatur/kjøleskap
Trich.vaginalis	Aptima Swab		Romtemperatur/kjøleskap