

## *HUSKELISTE FOR OPTIMAL PRØVETAKING*

---

- **Celleprøven tas før all annen eksplorasjon og behandling.** Gjelder også innvendig ultralyd. Hensikten med dette er å unngå kontaminering med eksplorasjonsgel eller annet som pasienten behandles med.
- **Tørk av overflødig slim og blod**
- **Unngå prøvetaking under menstruasjon**
- **Det anbefales kun bruk av lunkent vann ved prøvetakingen.**
  - Der det er nødvendig kan det brukes en sparsom mengde vannbasert gel sidene av spekelet – unngå tuppen.

***MERK: det må absolutt ikke brukes geler som inneholder carbomere/carbopolpolymere!***

- **Umiddelbar og grundig prøveoverføring er avgjørende.** ThinPrep inneholder et kraftig fikseringsmiddel, så dersom børsten etterlates i prøvebeholderen, selv en kort stund, vil cellene fikseres fast til børsten. Trykk prøvetakingsbørsten godt ned mot bunnen av prøvebeholderen og gjenta ti ganger. Avslutt med å røre kraftig. Kast så børsten.
- **Merk prøven med strekkodeetikett umiddelbart etter prøvetakingen.** Etiketten plasseres vertikalt utenpå fabrikantens etikett. Ikke klistre etiketten over «vinduet» på boksen da dette er nødvendig for å lese av væsknivå i prøvebeholderen. Bruk etikett med sluttbokstav A.

**NB!** Husk at etikettene må plasseres vertikalt utenpå fabrikantens etikett. Ikke klistre igjen «vinduet» på boksen da dette er nødvendig for å kunne lese av væsknivå.