

Informasjon til legekantoret

F-Hemoglobin til Fürst

alternative navn: iFOBT, FIT, okkult blod i avføring

- Analysen krever kun 1 prøverør
- Analysen krever ingen restriksjoner når det gjelder kosthold og diett


På grunn av nedbrytning av hemoglobin, må avføringen overføres til prøverøret umiddelbart for å unngå falskt negativt svar.

Merk prøverøret med etikett før det gis til pasient. Bruk etikett merket med i sluttsiffer "A", "B" eller "Y". Sett etiketten med prøveld direkte på prøverøret, **ikke** på transporthylsen.



Ved mottak av prøverør fra pasient:

- Sjekk at korken er skrudd ordentlig fast
- Putt prøverør i transporthylse og skru korken på transporthylsen
- Send prøverøret i transporthylse til Fürst

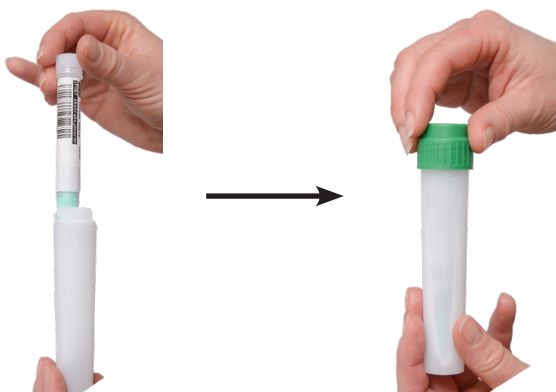

For mer informasjon om analysen, vennligst se vår hjemmeside (QR kode) eller på furst.no