

Avføringsprøve til Fürst: Informasjon til **legekontoret**



Rekvirenter med Forum Fleks, papirløs rekvirering:

Bruk etikett som er merket med
"Fecesprøve, halvfullt rør".



Rekvirenter med Fürst Forum eller manuelle rekvisisjoner:

Bruk etiketten fra rekvisisjonen
eller følgeskrivet med sluttsiffer
"A" eller "B".

NB: Sett etiketten med prøvelD direkte på prøvebeholderen,
ikke på transporthylsen.

Prøven har en holdbarhet på inntil 7 dager i romtemperatur før
analyse. Prøven kan eventuelt fryses ned for senere forsendelse,
merk da røret med: fryst + dato.