







# MIKROBIOLOGI - FOR REKVIRENTER

Bruk strekkode med relevant lokasjonssnavn, eller strekkode med slottsiffer A eller B og skriv på lokasjon.

Rør med skrukork uten tilsetning	<b>Aptima</b> lyseringsbuffer	<b>Copan eSwab</b> Amies transportmedium		<b>Fecal swab</b> Cary Blair	
	Normal pensel	Normal pensel	Tynn pensel	Tynn, lang pensel	
					
Dermatofytter (Sopp)	PCR <i>Chlamydia, Mycoplasma gen., Trichomonas vag. og gonoré</i>	Dyrkning og PCR - bakterier og virus Luftveisinfeksjon, herpes, syfilis og vev		Diarévirus, tarm- patogene bakterier og parasitter	
Negl, hud, hår.	Underliv, anus, hals, øye eller sæd.	Sekret fra nese, hals og sår.  <i>NB! Rektum for ESBL- og VRE-screening.</i>	Sekret fra øye, øre, nesegang, hals og sår. Pediatriske prøver.	Sekret fra nasopharynx.	Feces.
Lang holdbarhet, men prøven bør sendes lab så raskt som mulig.		PCR: Holdbar i 5 døgn i romtemperatur / 7 døgn i kjøleskap. Dyrkning: Holdbar i 48 timer i kjøleskap. - Gonokokker: 24 timer i romtemperatur. - Anareobe bakterier: 24 timer i kjøleskap.			