



Prøvetakingsprosedyre for Rovers Cervex Brush

Den vanlige børsten!

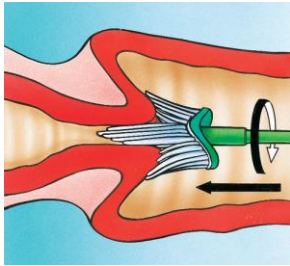

Ta prøve fra cervix

Før børsten inn i livmormunnen slik at de korteste bustene får god kontakt med ektocervix. Trykk lett og roter børsten 360° fem ganger med klokken.

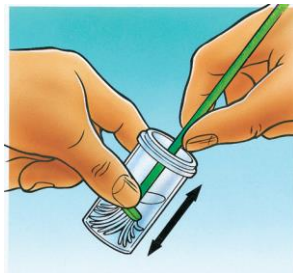

Skyll børsten

Skyll børsten godt i væsken ved å trykke den godt ned mot bunnen av prøvebeholderen ti ganger. Avslutt med å røre kraftig.



Skru lokket godt igjen

Lokket skal skrus igjen til den sorte prikken på lokket passerer den sorte prikken på prøvebeholderen.



Merk prøvebeholderen

Prøvebeholderen merkes med strekkodeetikett fra rekvisisjonen. Benytt etikett med sluttbokstav A.



Send prøven til laboratoriet

Prøven legges i en transporthylse, før prøve og rekvisisjon legges i samme konvolutt og sendes til laboratoriet. Prøven oppbevares i romtemperatur.

NB! Det anbefales kun lunkent vann som smøremiddel på spekelet. Der det er nødvendig kan det benyttes en sparsom mengde vannbasert gel på sidene av spekelet - unngå tuppen.